


DENSIM

DENTAL INSTRUMENTS

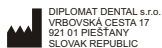

Návod na použitie a hygienu

PARIS U 1:1 LUX kolienkový násadec – spodný diel



Dôležité údaje

- PARIS U 1:1 LUX kolienkový násadec – spodný diel:
- je určený výlučne na stomatologické ošetrovanie pacienta.
- je klasifikovaný ako zdravotnícky výrobok v zmysle príslušných národných predpisov.

Tieto ustanovenia určujú, že:

- musia byť dodržiavané príslušné bezpečnostné predpisy a predpisy na ochranu zdravia.
- výrobok smie používať iba oprávnený a zaškolený užívateľ v súlade s týmto návodom na použitie.
- používať sa smie iba výrobok v bezchybnom stave.
- je potrebné predísť akejkoľvek kontaminácii výrobku.
- pacienti, užívatelia a tretie osoby musia byť chránené pred rizikami.



Pripojenie mikromotora: Nasadenie / Snímanie


Násadec sterilizujte pred prvým použitím a taktiež po každom ďalšom použití.



Nasajte spodný diel kolienkového násadca na mikromotor až do jeho počuteľného zaskočenia. Pozri obrázok vyššie. **Pred každým použitím násadec starostlivo zatlačte, aby ste sa ubezpečili, že je bezpečne upevnený na mikromotor.** Na sňatie kolienkového násadca z mikromotora je potrebné odtlačiť silno obe časti od seba.

Upínanie / Vyberanie hlavičky

Otočte úplne upínací krúžok násadca, pridržte ho a vložte hlavičku a zároveň otočte upínací krúžok späť. Ak chcete hlavičku oddeliť, otočte úplne upínací krúžok násadca a hlavičku vyberte.

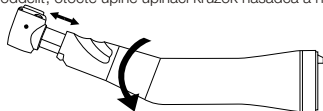

Čistenie a údržba

Upozorňujeme Vás, že kolienkovým násadcom PARIS ste si zakúpili vysokokvalitný výrobok. Predčasné opotrebenie a nesprávna údržba a servis skracujú životnosť výrobku. Na čistenie a údržbu doporučujeme používať plne syntetický olej DENSIM OIL.

Po každom ošetrení pacienta urobte nasledujúcu údržbu:

1. Oddelte hlavičku od kolienkového násadca (pozri vyššie uvedený návod)
2. Očistite vonkajší povrch
3. Dezinfikujte
4. Namažte olejom
5. Sterilizujte

Čistenie vonkajšieho povrchu

Spodný diel kolienkového násadca PARIS U 1:1 LUX môžete čistiť oplachom pod prúdom tečúcej vody alebo alkoholovým roztokom. V prípade, že je potrebné vyčistiť kanálky spreja, použite príbalený čistiace ihly. Čistiace ihly po čistení dezinfikujte.



Je prísne zakázané umiestňovať kolienkový násadec do ultrazvukovej čističky. Dôsledkom takéhoto kroku je jeho znefunkčnenie.

Dezinfekcia


Vonkajší povrch spodného dielu kolienkového násadca PARIS U 1:1 LUX je možné dezinfikovať. Na povrchovú dezinfekciu používajte výlučne chemické dezinfekčné prostriedky schválené DGHM.



V žiadnom prípade neponárajte kolienkový násadec do dezinfekčného roztoku. Dôsledkom takého kroku by bolo jeho znefunkčnenie.

Mazanie olejom

Na mazanie a údržbu používajte olej DENSIM OIL. Naskrutkujte určený adaptér na dózu DENSIM OIL. Nasajte spodný diel násadca zadnou časťou na olejový adaptér a stlačte tlačidlo spreja na 1-2 sekundy.

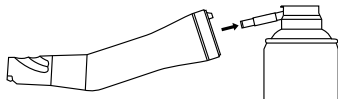

Sterilizácia

Spodný diel kolienkového násadca DENSIM sterilizujte v autokláve pri teplote do maximálne 135°C (2 bar). Dbajte na pravidlá v návode na používanie od výrobcu autoklávy. Používajte parný sterilizátor zodpovedajúci DIN EN 13060 resp. DIN EN 285.

Ošetrový nástroj musí byť uskladnený v sterilnom, tmavom, suchom a chladnom prostredí, chránený pred nečistotami.



Dbajte na dátum expirácie sterilizovaného nástroja. Na čistenie sa smú používať iba prostriedky, ktoré nie sú vyrobené na báze chlóru alebo chemických roztokov. Nepoužívajte sušiče (následný ohrev). Originálne balenie výrobku (kazeta) nie je určená na použitie v autokláve.

Upozornenie

V prípade kolísavých otáčok, nepravidielného chodu, zvýšenej hlučnosti chodu, zreteľných vibrácií, prehriatí, nedostatočnom uchopení rotačného nástroja v upínacom mechanizme a zreteľnom poškodení, nepokračujte v práci s kolienkovým násadcom. V takýchto prípadoch kontaktujte prosím, autorizovaný servis s požiadavkou na opravu alebo svojho predajcu.



Záruka

Pri akceptovaní vyššie uvedených pokynov budete s výrobkom spokojní niekoľko rokov. V prípade reklamácie garantujeme záruku v dĺžke jedného roka.

REF	SN			
Číslo položky	Výrobné číslo	Upozornenie!	Sterilizovateľné v autokláve pri teplote maximálne 135°C	Vhodné pre dezinfekciu sprejom a s použitím dezinfekčných uterákov.

*KaVo je registrovaná obchodná značka firmy KaVo Dental GmbH. DENSIM nie je žiadnou pridruženou spoločnosťou spoločnosti KaVo Dental GmbH.

Technické údaje

Kolienkový násadec PARIS U 1:1 LUX – spodný diel – modrý
Prevodový pomer: 1:1
Rýchlosť otáčok: maximálne 40.000 ot/min
Použiteľné hlavičky: PARIS HEAD, DUBLIN HEAD alebo KaVo® INTRA LUX
REF DSLP11LSET (PARIS U 1:1 LUX)
Dátum revízie: 3_2015

Technické údaje

Kolénkový násadec PARIS U 1:1 LUX spodný diel - modrý
Převodový poměr: 1:1
Rychlost otáček: maximálně 40.000 ot/min
Použitelné hlavičky: PARIS HEAD, DUBLIN HEAD nebo KaVo® INTRA LUX
REF DSLP11LSET (PARIS U 1:1 LUX)
Datum revize: 3_2015

Návod na použití a hygienu

PARIS U 1:1 LUX kolénkový násadec – spodní díl



Důležité údaje

- PARIS U 1:1 LUX kolénkový násadec – spodní díl:
- je určený výlučně na stomatologické ošetření pacienta.
- je klasifikovaný jako zdravotnický výrobek třídy IIa ve smyslu příslušných národních předpisů.

Tyto ustanovení určují, že:

- musí být dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy a předpisy na ochranu zdraví.
- výrobek smí používat pouze oprávněný a proškolený uživatel v souladu s tímto návodem k použití.
- používat se smí pouze výrobek v bezchybném stavu.
- je potřeba předéjit jakékoliv kontaminaci výrobku.
- pacienti, uživatelé a třetí osoby musí být chráněni před riziky.



Připojení mikromotoru: Nasazení / Snímání

Násadec sterilizujte před prvním použitím a taktéž po každém dalším použití



Nasajte spodní díl kolénkového násadce na mikromotor až do jeho slyšitelného zaskočení. Viz. obrázek výše. **Před každým použitím násadec starostlivě zatlačte, aby jste se ubezpečili, že je bezpečně upevněn na mikromotor.** Na sejmutí kolénkového násadce z mikromotoru je potřebné odtlačit silně obě části od sebe.

Upevnění / Vybrání hlavičky

Otočte úplné upínací kroužek násadce, přidržte ho a vložte hlavičku a zároveň otočte upínací kroužek zpět. Pokud chcete hlavičku oddělit, otočte úplně upínací kroužek násadce a hlavičku vyjměte.



Čištění a údržba

Upozorňujeme Vás, že nákupem kolénkového násadce PARIS jste zakoupili vysoce kvalitní výrobek. Předčasné opotřebování a nesprávná údržba a servis zkracují životnost výrobku. Na čištění a údržbu doporučujeme používat plně syntetický olej DENSIM OIL.

Po každém ošetření pacienta proveďte následující údržbu:

1. Oddelte hlavičku od kolénkového násadce (viz. výše uvedený návod)
2. Očistěte vnější povrch
3. Dezinfikujte
4. Namažte olejem
5. Sterilizujte

Čištění vnějšího povrchu

Spodní díl kolénkového násadce PARIS U 1:1 LUX můžete čistit oplachem pod proudem tekoucí vody nebo alkoholovým roztokem. V případě, že je potřebné vyčistit kanálky spreje, použijte příbalené čisticí ihly. Čisticí ihly po čišťení dezinfikujte.



Je přísně zakázáno umísťovat kolénkový násadec do ultrazvukové čističky. Důsledkem takového kroku je jeho znefunkčnění.

Desinfekce


Vnější povrch spodního dílu kolénkového násadce PARIS U 1:1 LUX je možné desinfikovat. Na povrchovou desinfekci používejte pouze chemické desinfekční prostředky schválené DGHM.



V žádném případě nepoukujte kolénkový násadec do desinfekčního roztoku. Důsledkem takového kroku by bylo jeho znefunkčnění.

Mazání olejem

Na mazání a údržbu používejte olej DENSIM OIL. Našroubujte určený adaptér na dózu DENSIM OIL. Nasajte spodní díl násadce zadní částí na olejový adaptér a stlačte tlačítko spreje na 1-2 sekundy.

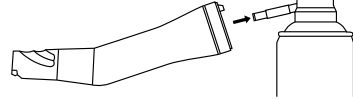

Sterilizace

Spodní díl kolénkového násadce DENSIM sterilizujte v autokláve při teplotě do maximálně 135°C (2 bar). Dbejte na pravidla v návodu na použití od výrobce autoklávy. Používejte parní sterilizátor odpovídající DIN EN 13060 resp. DIN EN 285.

Ošetřový nástroj musí být uskladněn ve sterilním, tmavém, suchém a chladném prostředí, chráněný před nečistotami.



Dbejte na datum expirace sterilizovaného nástroje. Na čištění se mohou používat pouze prostředky, které nejsou vyrobené na bázi chlóru nebo chemických roztoků. Nepoužívejte sušiče (následný ohřev). Originální balení výrobku (kazeta) není určená na použití v autokláve.

Upozornění

V případě kolísavých otáček, nepravidielného chodu, zvýšené hlučnosti chodu, zřetelných vibrací, přehřátí, nedostatečného uchopení rotačního nástroje v upínacím mechanizmu a zřetelném poškození nepokračujte v práci s turbínou. V takových případech kontaktujte, prosím, autorizovaný servis S požadavkem na opravu nebo svého prodejce.

Záruční doba

Při akceptování výše uvedených pokynů budete s výrobkem spokojeni několik let. V případě reklamace garantujeme záruční dobu v délce jednoho roku.

REF	SN			
Číslo položky	Výrobní číslo	Upozornění!	Sterilizovatelné v autokláve při maximální teplotě 135°C	Vhodné pro desinfekci sprejem a s použitím desinfekčních utěrůk.

*KaVo je registrovaná obchodní značka firmy KaVo Dental GmbH. DENSIM není žádnou přidruženou společností společnosti KaVo Dental GmbH.