

DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany
SLOVENSKO



NÁVOD NA POUŽITÍ

Židlička pro stomatologa **D10L**



Obsah

1. ÚČEL A POUŽITÍ.....	2
2. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	2
3. POPIS VÝROBKU.....	3
4. OBSLUHA VÝROBKU.....	4
5. BALENÍ VÝROBKU.....	4
6. PŘEDINSTALAČNÍ POŽADAVKY	5
7. ČISTENÍ A DEZINFEKCE.....	5
8. ZÁRUKA.....	5
9. LIKVIDACE VÝROBKU.....	5

1. ÚČEL A POUŽITÍ

Je to zařízení používané samostatně nebo se stomatologickou soupravou řady DIPLOMAT. Je určeno pro vybavení ambulancí a specializovaných pracovišť různých odborů v stomatologii. Stolička umožňuje stomatologovi a asistentovi práci v sedě a zohledňuje všechny požadavky ergonomie.

Stolička pro stomatologa D10L se vyrábí ve dvou provedeních:

- pro lékaře
- pro asistenta

Obě provedení jsou vyráběné s pevným nosičem opěradla zad nebo posuvným opěradlem zad. Pro obě provedení je možné dodat s kruhem pod nohy.


Stolička pro stomatologa D10L splňuje obecné požadavky normy STN ISO 7493.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Nejnižší výška sedadla	500 ± 20 mm
Nejvyšší výška sedadla	690 ± 20 mm
Rozsah nastavení výšky sedadla	500 - 690 mm
Hloubka sedadla	420 mm
Šířka sedadla	420 mm


Rozsah nastavení opěradla hřbetu:

Provedení pro lékaře s pevným nosičem opěradla zad	$70 \pm 20 \div 340 \pm 20$ mm
Provedení pro asistenta s pevným nosičem opěradla zad	$130 \pm 20 \div 380 \pm 20$ mm
Provedení pro lékaře s posuvným nosičem opěradla zad	$95 \pm 20 \div 365 \pm 20$ mm
Provedení pro asistenta s posuvným nosičem opěradla zad	$160 \pm 20 \div 380 \pm 20$ mm

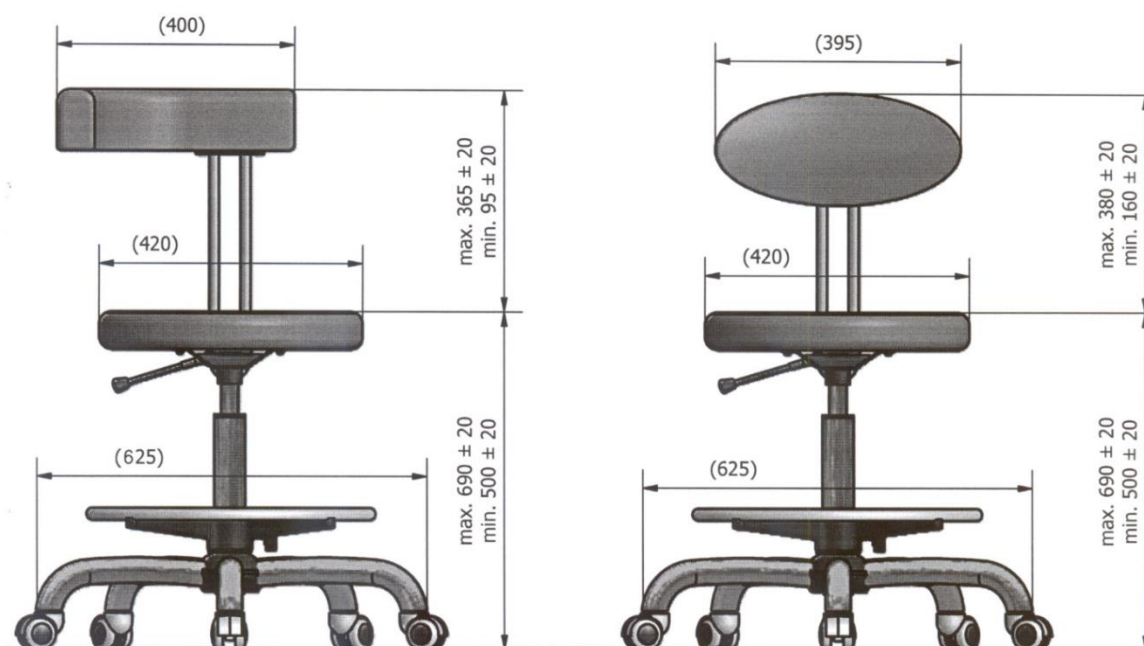


3. POPIS VÝROBKU

STOLIČKA D10L PROVEDENÍ PRO LEKÁŘE POSUVNÝ NOSIČ OPERADLA ZAD

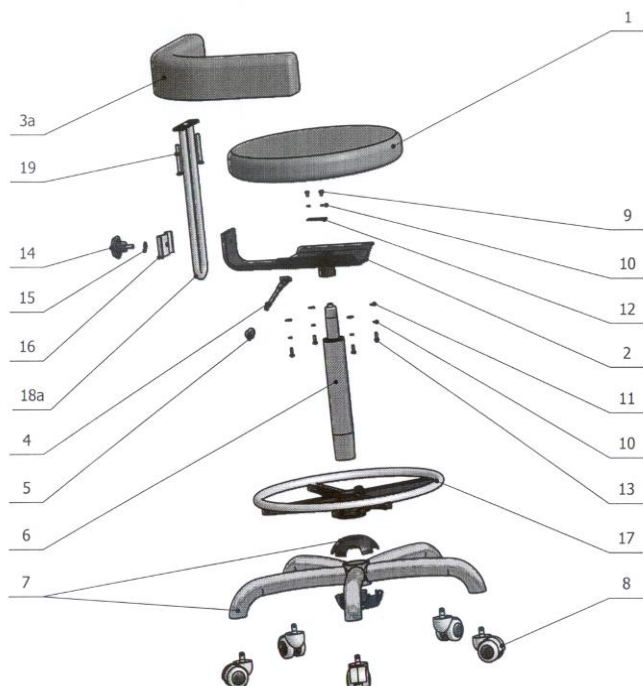

STOLIČKA D10L PROVEDENÍ PRO ASISTENTA POSUVNÝ NOSIČ OPERADLA ZAD

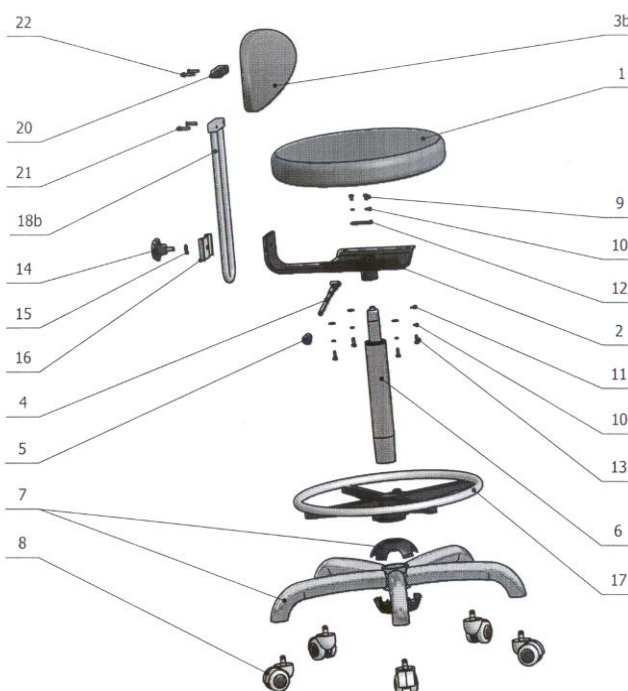


1.	SEDADLO (PODĽA FAREBNÉHO PREVEDENIA)	ME285300.003	1ks
2.	NOSIČ	V513.01-00-00	1ks
3a.	OPERADLO CHRBTIA LEKÁR	ME285300.130	1ks
3b.	OPERADLO CHRBTIA ASISTENT	ME285300.002	1ks
4.	OVLÁDACIA PÁKA - KOMPLET	V512.02-00-00	1ks
5.	RUKOVÄŤ OVLÁDACEJ PÁKY	ME321861.006	1ks
6.	PLYNOVÉ PERO	ME337500.015	1ks
7.	KRÍŽ S KRYTKOU	ME469000.004	1ks
8.	KOLIESKO	ME549428.013	5ks
9.	SKRUTKA M 5x8	ME309543.069	2ks
10.	PODLOŽKA P 5,1	ME311214.031	6ks
11.	PODLOŽKA P 5,3	ME311212.018	4ks
12.	PRÍCHYTKA OVLÁDACEJ PÁKY	V512.00-00-05	1ks
13.	SKRUTKA M 5x16	ME309543.089	4ks
14.	SKRUTKA DRŽIAKA	ME321861.010	1ks
15.	PODLOŽKA P 8,4	ME311210.018	1ks
16.	PRÍCHYTKA DRŽIAKA	V512.04-00-02.1	1ks
17.	KRUH POD NOHY	ME469000.003	1ks
18a.	DRŽIAK LEKÁR	V513.03-01-00	1ks
18b.	DRŽIAK ASISTENT	V513.04-01-00	1ks
19.	SKRUTKA M 8X70	ME307991.011	2ks
20.	SILENTBLOK ASISTENT	ME443620.005	1ks
21.	SKRUTKA M 5X25	ME307991.014	2ks
22.	SKRUTKA M 5X25	ME309255.088	2ks


4. OBSLUHA VÝROBKU

Stisknutím ovládací páky pod sedadlem (1) se výškově nastavuje sedadlo.

Uvolněním vrutu na opěrce (2) se nastavuje vzdálenost (výška) opěrky od sedadla.

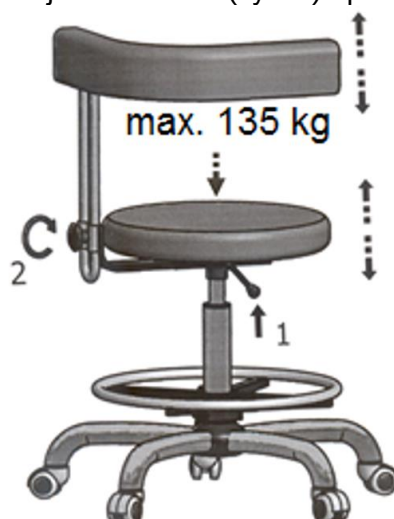

5. BALENÍ VÝROBKU

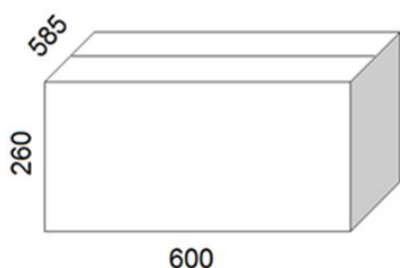

Rozměry balení:	600x585x260 mm
Objem balení:	0,09 m ³
Hmotnost:	
Obrázky 1,3:	11 ± 1 kg
Obrázky 2,4:	12 ± 1 kg

6. PŘEDINSTALAČNÍ POŽADAVKY

 Upozornění	Předinstalace a instalace musí být provedené dle platných norem dané krajiny a v souladu s platnou dokumentací výrobce, které držitelem je každý autorizovaný zástupce DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
--	---

Podlaha musí mít pevný základ. Sklon podlahy může být max. 1 %.

Antistatická podlaha se upřednostňuje.

Prostředí

rozsah teploty okolí	od +10 °C	do +40 °C
rozsah relativní vlhkosti	od 30 %	do 75 %

7. ČISTENÍ A DEZINFEKCE

Čištění vnějších ploch stoličky vykonávat vlhkou utěrkou. Předepsaný prostředek je INCIDIN FOAM-sprej (HENKEL-ECOLAB). Čištění je nutné vykonávat pravidelně i při případném znečištění povrchu biologickým materiálem.

 Výstraha	Čalouněné části stoličky se nesmí čistit prostředky, které narušují strukturu koženky, jako např. aceton, trichlor, perchlor, alkohol, abrazivní čistící prostředky, leštící politory
--	---

8. ZÁRUKA

- Na stomatologické křeslo je poskytována záruka dle záručního listu.
- Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem odevzdání zboží prvnímu dopravci na přepravu pro kupujícího, případně okamžikem převzetí zboží přímo kupujícím.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změny v rámci inovace výrobku.

 Upozornění	Závady způsobené nedbanlivou obsluhou nebo nerespektováním pokynu v Návodě na použití, nebudou uznané jako předmět záruční reklamace.
--	---

9. LIKVIDACE VÝROBKU

Při likvidaci stoličky je nutné dodržet předpisy platné v dané zemi. Jestli nejsou k takové likvidaci určené odborné firmy, je nutné demontovat plastové díly, oddělit čalounění od kovových částí a odevzdat do příslušných sběrných středisk.